



CENTAUROS
EQUIPOS QUE SALVAN VIDAS

AÑO: 2020

Ficha Técnica

Características

Marca

CABESTRILLO MAYO

Es un producto sanitario que se emplea para la sujeción e inmovilizador de brazo y hombro afectados por lesiones o fracturas.

Se ha diseñado para una aplicación y ajuste fácil. Soporta antebrazo y muñeca e incorpora una tira soporte para el dedo pulgar. La cinta torácica limita el movimiento del hombro.

COMPOSICIÓN

Cabestrillo y tiras de TNT 90g/m² y cierres velcro. Las anillas de sujeción son de Nylon 100%.

MODO DE EMPLEO

Colocar el codo en el cabestrillo y pase la correa del cuello por la parte posterior y sobre el hombro sano.

Pase el extremo de la otra correa por el aro y abróchelo.

Para colocar el cabestrillo de manera adecuada, la mano debe estar ligeramente elevada por encima del codo.

Si lo desea, coloque el pulgar en la cinta para su apoyo.

CARACTERÍSTICAS

Diseñado para una aplicación y ajuste fácil. Soporta el antebrazo y la muñeca.

Presenta una correa vertical ajustable con enganches, su función es distribuir el peso del brazo a través de la espalda y el hombro para una mayor comodidad.

La cinta torácica limita el movimiento del hombro.

Incorpora una tira soporte para el dedo pulgar.

En este modelo también se incluye el cierre con velcro para ajustar la inclinación ideal.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.

No utilizar el producto sobre piel lesionada.

No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.

Caducidad: 5 años



 **MARCA:**
NACIONAL
SKU: 8527

